




Manual de Instruções

Agulha de Sutura VOLMED

Nome Técnico: Agulhas para Sutura Volmed

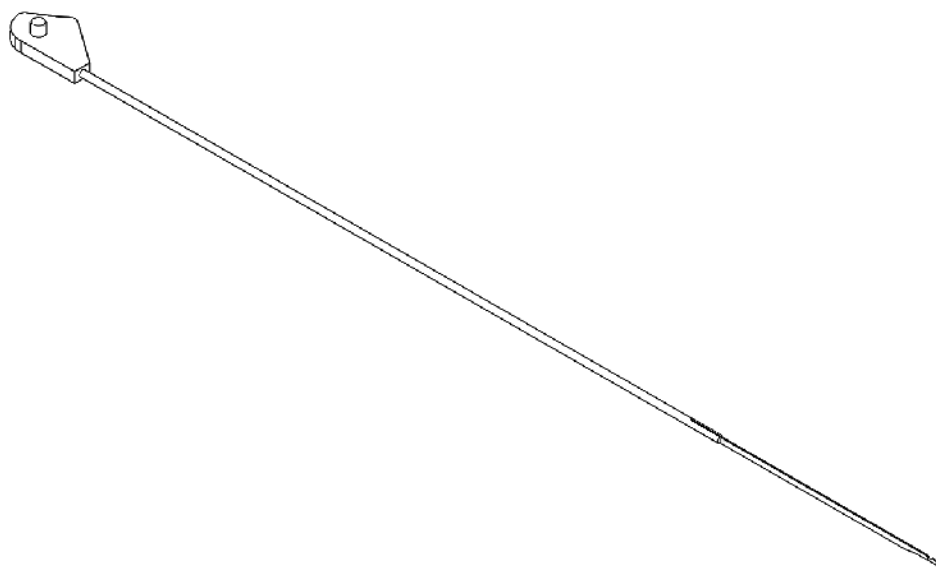

Fabricante:

VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -ME
AV. SÃO GABRIEL, 291 – JD. PAULISTA

CEP: 13574-540 - São Carlos - SP

CNPJ: 20.137.275/0001-89

Responsável técnico:

Rodrigo Gomes da Silva

CREA-SP 5063397397

Registro ANVISA Nº: 81130100003

Tel/Fax: (16) 3419-1794

www.volmed.com.br

Produto **Estéril**, de **uso único**, Proibido Reprocessar.

INDICAÇÕES

As **Agulhas de Sutura VOLMED**, tem como finalidade de uso suturar através do tecido mole em reparações ortopédicas. As agulhas de sutura VOLMED são confeccionadas em aço cirúrgico especial, proporcionando fácil inserção do fio cirúrgico.

FINALIDADE:

A agulha de sutura é um dispositivo projetado para permitir a manipulação da sutura através do tecido mole em procedimentos cirúrgicos artroscópicos.

Foi desenvolvido para ser utilizado por profissionais da área de saúde, que estejam familiarizados com instrumentos cirúrgicos. O cirurgião é responsável pela aprendizagem das técnicas empregadas neste sistema. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

MODELOS:

- Guia Flexível para Passador de Sutura 1,5 mm x 238 mm (Compatível com Scorpion I)
- Guia Flexível para Passador de Sutura 1,5 mm x 238 mm (Compatível com Scorpion II)
- Guia Flexível para Passador de Sutura 1,5 mm x 238 mm (Compatível com Elite Pass e Expressw I)
- Guia Flexível para Passador de Sutura 1,5 mm x 238 mm (Compatível com Expressw II)

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspeccione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante

INSTRUÇÕES DE USO DA AGULHA DE SUTURA

- 1- Insira o passador pelo tecido;
- 2- Capture a sutura desejada.



PRECAUÇÕES

Produto esterilizado por Radiação Gama. Produto de USO ÚNICO.

Produto de uso exclusivamente profissional.

Abrir a embalagem somente em local limpo, sob condições de assepsia, no momento do uso.

Manusear o produto com as mãos higienizadas e protegidas com luvas.

Armazenar em local limpo, seco e ao abrigo da luz; manusear com cuidado para não afetar a embalagem.

A esterilidade do conteúdo só é garantida com a embalagem íntegra, sem dobras ou perfurações.

Em caso de avaria na embalagem, o produto deve ser re-embalado, identificado e esterilizado pelo mesmo processo original, constante no rotulo.

O fabricante recomenda o uso único

CONTRA INDICAÇÕES

Grandes rupturas ou lesões do tecido mole das quais as técnicas de sutura artroscópicas ou de acesso limitado podem proporcionar uma má redução nas lesões.

Rupturas do tecido mole que não possam ser adequadamente acessadas ou alcançadas de forma eficaz com a orientação deste instrumento.

Osso duro.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60.

A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

RASTREABILIDADE

As **Agulhas de Sutura VOLMED** possuem lotes que possibilitam seu rastreamento e o seu destino final caso seja necessário.

GARANTIA

A Agulha de sutura VOLMED é um material de consumo, portanto o mesmo não possui garantia.

Rodrigo Gomes da Silva
Responsável Técnico
Aglhas para Sutura Volmed
Reg. ANVISA: 81130100003
SAC: volmed@volmed.com.br
Fone: (16) 3419-1794

