

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BROCAS DIAMANTADAS VOLMED

Nome Técnico: **BROCAS CIRÚRGICAS**

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

REV. 01

INTRODUÇÃO

Função e Indicação das Brocas Cirúrgicas Volmed:

A família de Brocas Cirúrgicas Volmed, tem por finalidade realizar perfurações, cortes, acabamento, desbastes e raspagem óssea em procedimentos cirúrgicos em ortopedia, otorrino, cabeça e pescoço, BucoMaxilo, coluna e crânio.

Os modelos da família das brocas cirúrgicas Volmed, são diferenciados pelo tipo de ponta ativa, comprimento, tipo de encaixe e diâmetros.

INSTALAÇÃO DAS BROCAS CIRÚRGICAS :

Instalação das brocas cirurgicas com encaixes R e J.

1 | Recue a luva da Peça de Mão;



2 | Insira a extremidade da Fresa Cirúrgica escolhida até o fundo da Peça de Mão;



3 | Gire levemente a Fresa Cirúrgica encaixando a mesma na peça de mão e em seguida, solte a luva;



4 | Posteriormente, insira a peça de mão no motor.



Instalação das brocas cirurgicas com encaixe H ou T ou O ou S ou F ou X ou A ou D ou L ou U nas peças de mão.

1 | Gire o manípulo da Peça de Mão no sentido anti-horário;



2 | Insira a extremidade da Fresa Cirúrgica escolhida até o fundo da Peça de Mão;



3 | Gire levemente a Fresa Cirúrgica encaixando a mesma na peça de mão e em seguida, gire o manípulo da Peça de Mão no sentido horário;



4 | Posteriormente, insira a peça de mão no motor;



Instalação da broca cirurgica no craniótomo.

1 | Solte o protetor de Duramater com a chave para fixação do protetor de Duramater, girando-a no sentido anti-horário;



2 | Insira a Fresa Cirúrgica BCCR44R ou BCCS44R no Craniótomo até verificar o encaixe;



3 | Em seguida, aperte o protetor de Duramater com a chave para fixação do protetor de Duramater, no sentido horário;

4 | Posteriormente, insira a peça de mão.



Instalação da broca cirurgica no perfurador

1 | Recue a luva do Perfurador ;



2 | Insira a extremidade da Fresa Cirúrgica até o fundo do Perfurador, gire levemente para a mesma se encaixar e em seguida, solte a luva;




3 | A Fresa Cirúrgica está instalada e o equipamento está pronto para ser utilizado.



Procedimento pós operatório:

1 | Retire a Fresa Cirúrgica da Peça de mão ou do Perfurador ou Craniótomo;

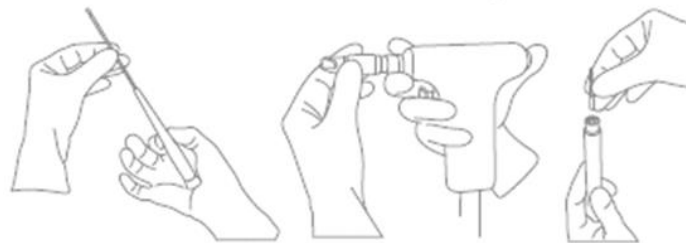

IMPORTANTE: Após o seu uso, a broca deverá ser descartada.

A broca cirúrgica é vendida em embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada, caso ocorra, o produto deverá ser descartado.

Estocar em local fresco, seco e longe de poeira e umidade.

PRECAUÇÕES:

A utilização de força excessiva, no momento da inserção das brocas na peça de mão, poderá fazer com que a broca dobre ou quebre, causando lesões no profissional que está manuseando.

O profissional deverá manipular as brocas com cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirúrgicas. Todas as vezes que for necessário manipular as brocas, use a haste que está fixada na peça de mão.

Fabricante recomenda uso único.

Se as brocas apresentarem algum dano, não deverão ser utilizadas.

Nunca utilize um dispositivo que apresente superaquecimento.

Cargas laterais excessivas podem causar superaquecimento do motor, de modo que seja desconfortável manuseá-lo. Não coloque um motor com superaquecimento no paciente.

Neste caso, interrompa a utilização e use-o de forma alternada.

A substituição de peça de mão ou broca, deve ser realizada somente depois de o equipamento não estiver mais funcionando ou superaquecido.

ESTERILIZAÇÃO:

O produto é esterilizado por ETO. A esterilização possui validade de 05 anos a partir da data de esterilização, se a embalagem estiver inviolada.

RASTREABILIDADE:

As brocas possuem números de lote que possibilitam seu rastreamento e o seu destino final caso seja necessário.

GARANTIA:

As brocas são materiais de consumo, portanto não possuem garantia.

Fabricante:

VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -EPP

AV. SÃO GABRIEL, 291 – JD. PAULISTA

CEP: 13574-540 - São Carlos - SP

CNPJ: 20.137.275/0001-89

Responsável Técnico:

Rodrigo Gomes da Silva

CREA-SP 5063397397

Registro ANVISA

nº: 81130100014

Tel/Fax: (16) 3419-1794