


MANUAL DO USUÁRIO

CÂNULA PARA ARTROSCOPIA VOLMED

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

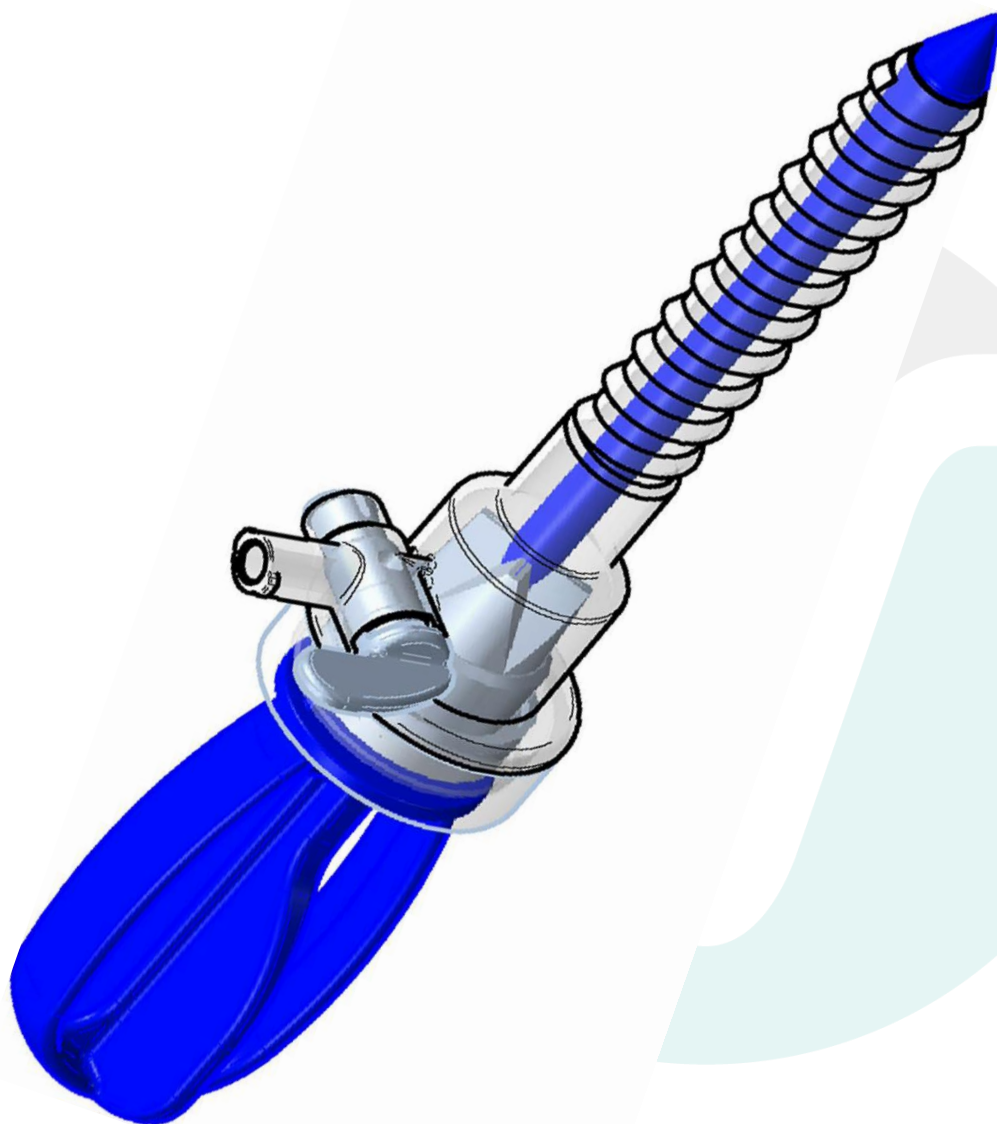

PRODUTO ESTÉRIL

Rev.00


FINALIDADE

A **Cânula para Artroscopia Volmed**, foi projetado para permitir a inserção ou remoção de instrumentos em procedimentos cirúrgicos artroscópicos

A Cânula para Artroscopia Volmed foi desenvolvida para ser utilizada por profissionais da área de saúde, familiarizados com instrumentos cirúrgicos. O cirurgião é responsável pelas técnicas empregadas neste sistema. A utilização inadequada poderá sofrer danos irreversíveis.

CANULA VOLMED

A Cânula Volmed é composta por:

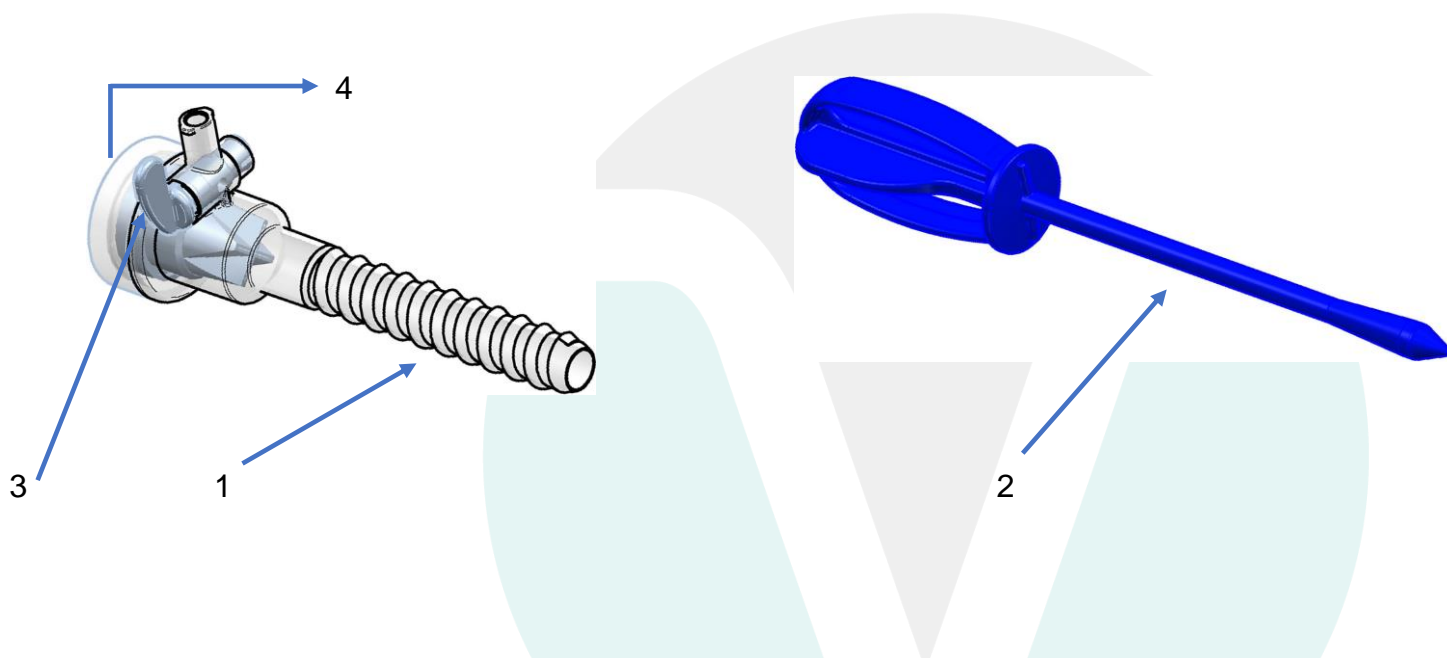

1 - Cânula: a cânula possui roscas em sua parte externa para manter a cânula na posição desejada durante a utilização

2 – Obturador: utilizado para a inserção da cânula

3 – Entrada lateral com torneira de fluxo: pode ser utilizada para a irrigação e aspiração

4 – Membranas de vedação: está localizada dentro da cânula e bloqueia o vazamento de fluido

MODELO DAS CANULAS VOLMED

Medidas

6,5mm x 70mm

6,5mm x 90mm

8,5mm x 70mm

8,5mm x 90mm

INSTRUÇÕES DE USO

Faça uma pequena incisão com o bisturi;

Insira o obturador na cânula;

Obs: Para facilitar a inserção do obturador, insira-o fazendo movimentos giratórios;

Insira a cânula com o obturador na incisão, girando-a no sentido horário;

Retire o obturador da cânula;

Verifique, através da visualização artroscópica, se a cânula penetrou completamente no espaço da articulação

Ao final do procedimento, retire a cânula, girando-a no sentido anti-horário.

PRECAUÇÕES:

- Durante a inserção do obturador ou outro instrumento, deve-se ter cuidado para evitar a perfuração das membranas de vedação. Caso a membrana seja danificada, deve-se substituir a cânula;
- A inserção do obturador ou de instrumentos umedecidos em soro fisiológico facilita a inserção;
- A entrada lateral da cânula possui encaixe Luer padrão. A cânula contém torneira para controle de fluxo.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS

Após o uso da cânula, a mesma deverá ser descartada.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Deve ser transportada em sua embalagem original, lacrado e sem sinais de violação;

- A Cãnula Volmed segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar em local fresco, seco e distante de poeira.

PRECAUÇÕES

- **NÃO REUTILIZE AS CÂNULAS VOLMED, FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO;**
- Se a Cãnula apresentar algum dano, a mesma não deverá ser utilizada

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por óxido de etileno. A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

RASTREABILIDADE

As Cãnulas Para Artroscopia Volmed possuem lotes que, juntamente com o sistema da qualidade possibilitam seu rastreamento e o seu destino final caso seja necessário.

GARANTIA

A Cãnula Volmed é um material de consumo, portanto o mesmo não possui garantia.

Fabricado por: VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS

Avenida São Gabriel, 291 – Jardim Paulista

CEP 13574-540 | São Carlos - SP

Resp. Téc.: Rodrigo Gomes da Silva

CREA: 5063397397

Registro ANVISA: 81130100009

Nome Técnico: Cãnula

Assistência Técnica:

Volmed Brasil Equipamentos

Fone: (16) 3419-1794