

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CÂNULAS PARA MICRODEBRIDAÇÃO VOLMED

NOME TÉCNICO: MICRODEBRIDADOR

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

Rev.01

INTRODUÇÃO

A família de CÂNULAS PARA MICRODEBRIDAÇÃO VOLMED, consiste de um conjunto de centenas de modelos, com aplicações cirúrgicas, e que podem ser acopladas a equipamentos do tipo “shaver” de diversos fabricantes. Promovem simultaneamente o corte e a eliminação de dejetos. Suas partes fixas e móveis de corte são produzidas em metal de grande dureza (tubo aço inoxidável 304, ponta 420B) e com dimensional controlado, o que minimiza o atrito, garantindo precisão no corte e mantendo-se a afiação por toda a sua vida útil.

As cânulas foram concebidas para serem utilizadas em equipamentos “shaver” disponíveis no mercado. Portanto, estes equipamentos não fazem parte da família de CÂNULAS PARA MICRODEBRIDAÇÃO VOLMED BRASIL

Cortes Disponíveis:

APC| APCR| CDM| CM| CMA| I.A| RPC| BA| BD| BR| BO

Diâmetros:

3,0| 3,2| 3,5| 4,0| 4,2| 4,5| 5,0| 5,2| 5,5| 6,0| 6,2| 6,5mm

Angulações:

0°| 5°| 12°| 15°| 20°| 25°| 30°| 40°| 45°| 60°.

Descrição Geral

Descrição do Produto e Formas de Apresentação ao Mercado

A família de Cânula para Microdebridação VOLMED É composta por uma cânula de corte e sucção montadas dentro de outra com função de guia.

A cânula é fornecida em caixa de papelão, embalada em plástico especial para produto estéril e acompanha o manual de instruções, e esterilizado por ETO.



Figura 1

Diferenças entre os Modelos e Suas Aplicações e Materiais:

Todos os modelos têm sua estrutura semelhante, mesmo processo produtivo (usinagem de precisão e montagem), mesmo material, diferenciando-se, na extremidade de corte, conforme tabela abaixo:

As Cânulas para Microdebridação Volmed têm sua base de conexão produzida em alumínio, cânulas e brocas em aço inoxidável.

Uso do Produto

O uso é recomendado para as seguintes aplicações cirúrgicas em:

- Artrites e sinovites do ombro;
- Bursoscopia ou endoscopia do espaço subacromial;
- Cirurgia da articulação acromioclavicular;
- Desbridamento da articulação do quadril na osteoartrose;
- Desbridamento da artrite séptica;
- Deslocamento da Patela;
- Exércere de corpos livres;
- Lesões da coifa dos rotadores;
- Lesões condriais por desbridamento;
- Lesões do ligamento da cabeça do femur;
- Lesões da longa porção do bíceps;
- Lesões do “labrum”;
- Lesões de ligamentos;
- Lesões do manguito rotador;
- Lesões de menisco;
- Lesões de tendão muscular;
- Ombro congelado;
- Síndrome do impacto ulno-carpal;
- Sinovite crônica;
- Tendinite calcária do ombro.
- Cirurgia de Urologia

Precauções ao Usar:

A cânula só deve ser manipulada por pessoa habilitada (médico).

Verificar a integridade do produto antes do uso, observando eventuais danos mecânicos (torta, amassada ou quebrada).

A retirada da cânula da peça de mão só deve ser realizada após certificar-se que não apresente superaquecimento.

Cuidados Especiais no Manuseio das Cânulas:

A embalagem interna só deve ser violada momentos antes do procedimento;

Ao encaixar a cânula no equipamento shaver, verificar se a conexão foi bem feita;

Acionar o equipamento para verificar se a cânula está girando livremente;

Restrições Importantes de Uso:

Não utilize cânulas que apresentem violação de embalagem;

Não utilize cânula em mau estado (tortas ou quebradas);

Nunca utilize em equipamento que apresente superaquecimento;

Não utilizar a cânula se não estiver girando livremente.

Descarte

As cânulas após o uso devem ser descartadas junto com o lixo contaminado. **Não podem ser reutilizadas. Fabricante recomenda uso único.**

Armazenamento e Transporte:

As cânulas devem ser transportadas em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;

Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e umidade.

Condições ambientais:

Temperatura: 10 °C a 30 °C.

Umidade Relativa: 30% a 75%;

Pressão Atmosférica: 700hPa a 1060hPa.

Esterilização

Produto é esterilizado por ETO.

A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação.

Caso a embalagem esteja violada essa garantia é automaticamente cancelada.

Rastreabilidade

As cânulas para Microdebridação VOLMED possuem lotes que possibilitam seu rastreamento e o seu destino final caso seja necessário.

Garantia

As cânulas para Microdebridação VOLMED possuem garantia de 4 meses contra defeitos de fabricação. A garantia NÃO cobre o desgaste das cânulas que acontece após a cirurgia.

Fabricante:

VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -EPP
AV. SÃO GABRIEL, 291 – JD. PAULISTA
CEP: 13574-540 - São Carlos - SP
CNPJ: 20.137.275/0001-89
Responsável Técnico:
Rodrigo Gomes da Silva
CREA-SP 5063397397
Registro ANVISA
nº: 81130100011
Tel/Fax: (16) 3419-1794