

# INSTRUÇÕES DE USO

## PONTEIRA DESCARTAVEL CONNECT PEN MINI

Nome Técnico: ELETRODO CIRURGICO

Produto **Estéril.**  
**PRODUTO DE USO ÚNICO.**

REV. 00

**Atenção:**

O fabricante recomenda a leitura completa do manual antes da utilização do produto!

**Apresentação e Utilizações:**


As PONTEIRAS DESCARTAVEL CONNECT PEN MINI possui a função de realizar ablação, coagulação, corte, dissecação e cauterização de tecidos em procedimentos cirúrgicos monopolar. Cabe ao Cirurgião responsável o domínio e a aprendizagem das técnicas utilizadas neste sistema, cuja utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis aos pacientes.

**Modelos:**

As PONTEIRAS DESCARTAVEL CONNECT PEN MINI estão disponíveis nos seguintes modelos:

ROUNDED 0°	PONTA CONVEXA	1,5 MM X 100 MM
ROUNDED 30°	PONTA CONVEXA	1,5 MM X 100 MM
ROUNDED 45°	PONTA CONVEXA	1,5 MM X 100 MM
ROUNDED 60°	PONTA CONVEXA	1,5 MM X 100 MM
ROUNDED 90°	PONTA CONVEXA	1,5 MM X 100 MM
STRIPED 0°	PONTA SECCIONADA 3 CORTES	1,5 MM X 100MM
STRIPED 30°	PONTA SECCIONADA 3 CORTES	1,5 MM X 100MM
STRIPED 45°	PONTA SECCIONADA 3 CORTES	1,5 MM X 100MM
STRIPED 60°	PONTA SECCIONADA 3 CORTES	1,5 MM X 100MM
STRIPED 90°	PONTA SECCIONADA 3 CORTES	1,5 MM X 100MM
SHELL 0°	PONTA CONCAVA	1,5 MM X 100MM
SHELL 30°	PONTA CONCAVA	1,5 MM X 100MM
SHELL 45°	PONTA CONCAVA	1,5 MM X 100MM
SHELL 60°	PONTA CONCAVA	1,5 MM X 100MM
SHELL 90°	PONTA CONCAVA	1,5 MM X 100MM

### **Imagens dos Modelos:**

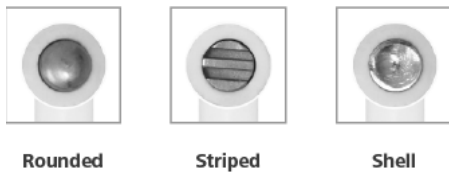


### **Instruções De Uso:**

Antes de Utilizar as PONTEIRAS DESCARTAVEL CONNECT PEN MINI verifique se a embalagem não esteja violada, retire o Eletrodo e insira no Bisturi Eletrônico, verifique se sua parte metálica encontra-se completamente inserida.

Durante os procedimentos as PONTEIRAS DESCARTAVEL CONNECT PEN MINI devem estar a uma distância de 1 a 3 mm no procedimento de coagulação e aproximadamente 1mm no procedimento de ablação da superfície.

### **Conhecendo o Produto:**

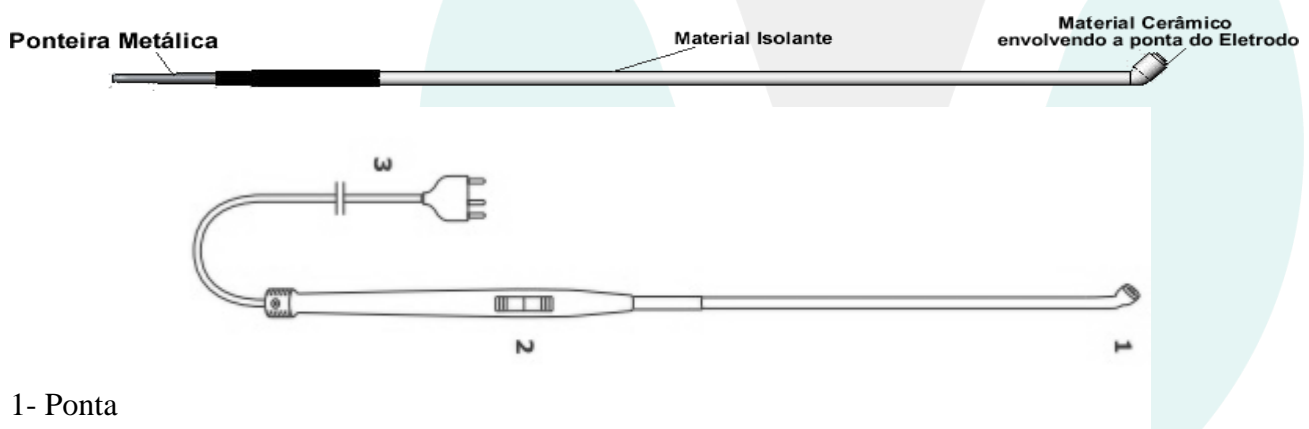

- 1- Ponta
- 2- Botão Responsavel Pelo Acionamento Da Ponteira
- 3- Cabo Para Conectar Na Unidade Cirurgica

### **Contra Indicações:**

As PONTEIRAS DESCARTAVEL CONNECT PEN MINI não devem ser utilizados em pessoas que usam Marca-Passo ou outros dispositivos eletrônicos implantáveis.

### ***Precauções:***

Por se tratar de um produto ESTERIL após o uso devem ser descartados.

Cabe ao Cirurgião responsável o domínio e a aprendizagem das técnicas utilizadas neste sistema.

Antes de utilizar o equipamento lei atentamente as Instruções de uso.

O mau uso pode acarretar queimaduras aos pacientes.

### ***Esterilização:***

As PONTEIRAS DESCARTAVEL CONNECT PEN MINI seguem em uma embalagem blister com papel grau cirúrgico estéril. A esterilização não é válida caso a embalagem esteja violada.

As PONTEIRAS DESCARTAVEL CONNECT PEN MINI são esterilizados por ETO.

A Esterilização é válida por TRÊS anos, caso a embalagem não esteja violada.

### ***Armazenamento e Transporte:***

As PONTEIRAS DESCARTAVEL CONNECT PEN MINI devem ser transportados em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação.

Devem ser estocados em local fresco e seco, longe de poeira e umidade.

### ***Rastreabilidade:***

As PONTEIRAS DESCARTAVEL CONNECT PEN MINI possuem lotes que garantem sua rastreabilidade desde a fabricação até o momento da venda.

Fabricado por:

Volmed Brasil Equipamentos Ltda – EPP

Av. São Gabriel, 291 | Jd. Paulista | CEP: 13574-540

São Carlos | SP | Fone: (16) 3419-1794

CNPJ: 20.137.275/0001-89

Responsável Técnico: Rodrigo Gomes da Silva

CREA 5063397397

Registro ANVISA: 81130100043

Nome Técnico: Eletrodo Cirúrgico