


MANUAL DE INSTRUÇÕES

ELETRODOS CIRURGICOS MONOPOLAR

VOLMED

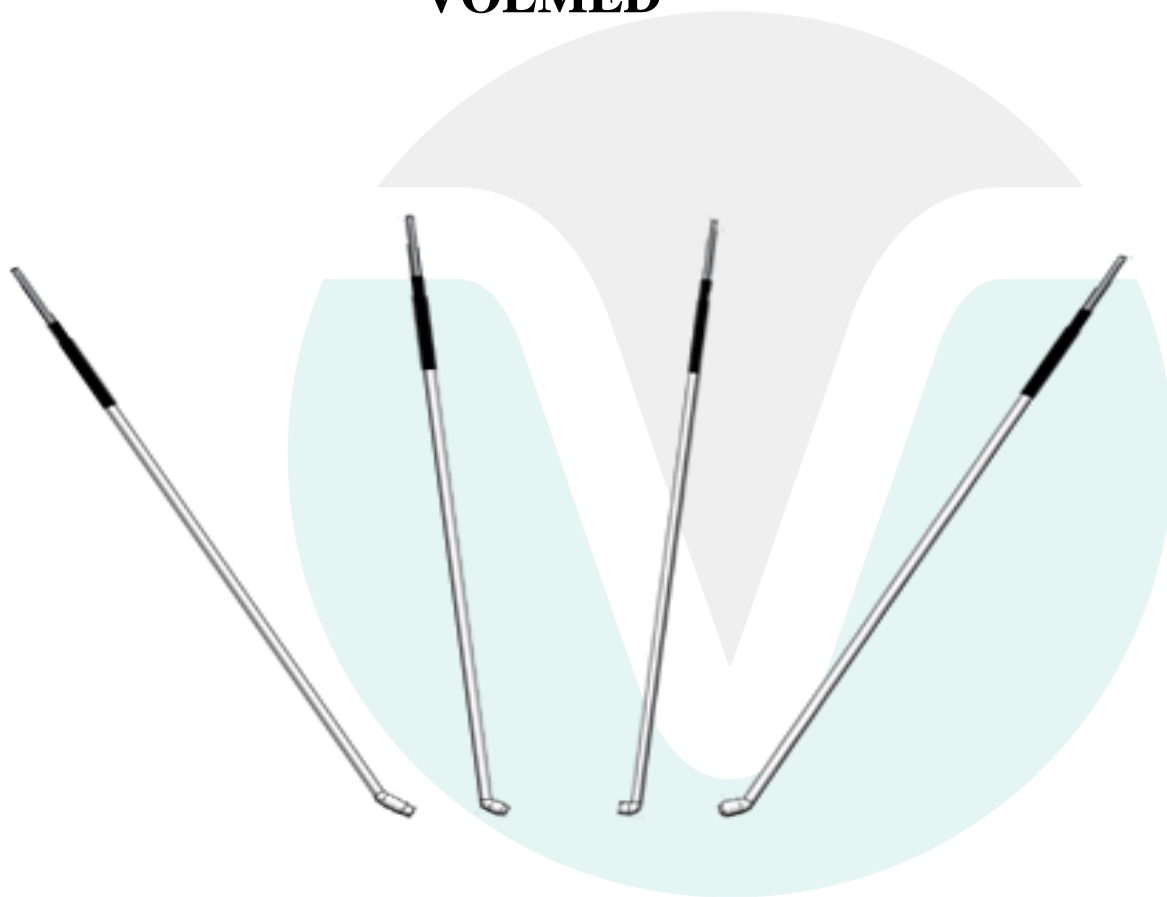

**PRODUTO ESTÉRIL.
FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.**

Rev. 00

Atenção:

O fabricante recomenda a leitura completa do manual antes da utilização do produto!

Apresentação e Utilizações:

Os eletrodos monopolar VOLMED são utilizados em procedimentos cirúrgicos artroscópicos em conjunto com bisturi eletrônico de rádio frequência. São utilizados para ablação e coagulação de tecidos nos joelhos, ombros, quadris, punhos e cotovelos.

Cabe ao cirurgião responsável o domínio e a aprendizagem das técnicas utilizadas neste sistema, cuja utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis aos pacientes.

Os Eletrodos VOLMED estão disponíveis nos seguintes modelos:

19-02-01-00 - STRIPED 0°	19-02-02-00 - STRIPED 15°
19-03-01-00 - SHELL 0°	19-02-03-00 - STRIPED 30°
19-04-01-00 - SHELL MINI 0°	19-02-04-00 STRIPED 45°
19-05-01-00 - HOOK 0°	19-02-05-00 - STRIPED 60°
19-06-01-00 - LONG HOOK 0°	19-02-06-00 - STRIPED 90°
19-07-01-00 - FIRE BLADE 0°	19-03-02-00 - SHELL 15°
19-01-01-00 - ROUNDED 0°	19-03-03-00 - SHELL 30°
19-01-02-00 - ROUNDED 15°	19-03-04-00 - SHELL 45°
19-01-03-00 - ROUNDED 30°	19-03-05-00 - SHELL 60°
19-01-04-00 - ROUNDED 45°	19-03-06-00 - SHELL 90°
19-01-05-00 - ROUNDED 60°	19-04-02-00 - SHELL MINI 15°
19-01-06-00 - ROUNDED 90°	19-04-03-00 - SHELL MINI 30°
	19-04-04-00 - SHELL MINI 45°

19-04-05-00 - SHELL MINI 60°
19-04-06-00 - SHELL MINI 90°
19-05-02-00 - HOOK 15°
19-05-03-00 - HOOK 30°

19-06-04-00 - LONG HOOK 45°
19-06-05-00 - LONG HOOK 60°
19-06-06-00 - LONG HOOK 90°
19-07-02-00 - FIRE BLADE 15°
19-07-03-00 - FIRE BLADE 30°
19-07-04-00 - FIRE BLADE 45°
19-07-05-00 - FIRE BLADE 60°
19-07-06-00 - FIRE BLADE 90°

19-05-04-00 - HOOK 45°
19-05-05-00 - HOOK 60°
19-05-06-00 - HOOK 90°
19-06-02-00 - LONG HOOK 15°
19-06-03-00 - LONG HOOK 30°

Imagens dos Modelos:



Rounded



Striped




Shell



Hook



Fire Blade

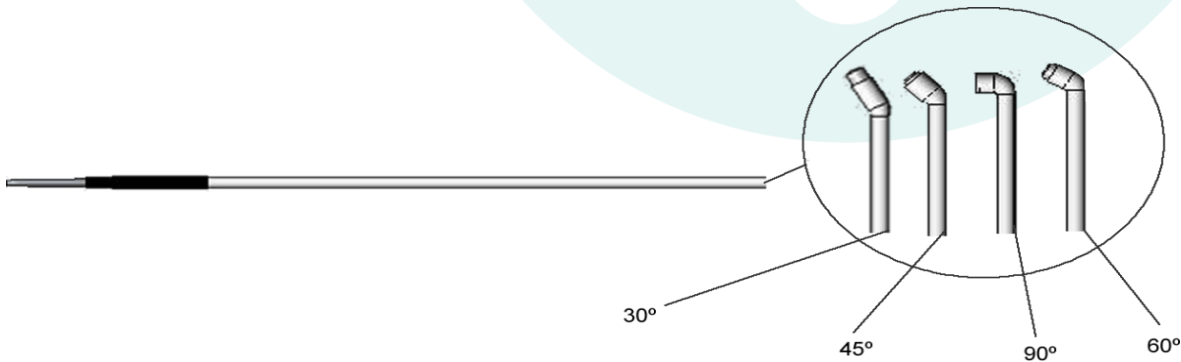


Instruções De Uso:

Antes de Utilizar os Eletrodos VOLMED verifique se a embalagem não encontra-se violada, retire o Eletrodo e insira no Bisturi Eletrônico, verifique se sua parte metálica encontra-se completamente inserida.

Durante os procedimentos os eletrodos VOLMED devem estar a uma distância de 1 a 3 mm no procedimento de coagulação e aproximadamente 1mm no procedimento de ablação da superfície.

Conhecendo O Produto:

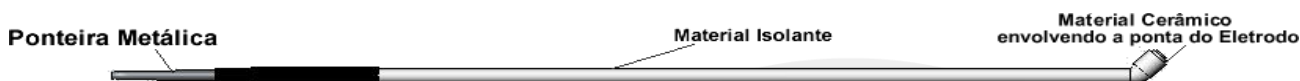

Contra Indicações:

Os Eletrodos VOLMED não devem ser utilizados em pessoas que usam Marca-Passo ou outros dispositivos eletrônicos implantáveis.

Precauções:

Por se tratar de um produto ESTÉRIL após o uso devem ser descartados – FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.

Cabe ao cirurgião responsável, o domínio e a aprendizagem das técnicas utilizadas neste sistema.

Antes de utilizar o equipamento lei atentamente as Instruções de uso.

O mau uso pode acarretar queimaduras aos pacientes.

Caso o eletrodo VOLMED apresente qualquer falha no seu isolamento o mesmo deve ser descartado.

Por se tratar de equipamentos de alta frequência podem ocorrer interferências em outros equipamentos Médicos.

Não utilize cânulas sem isolamento, pois a energia de rádio frequência pode ser transmitida do eletrodo até o paciente por meio desta cânula.

Nunca toque na parte metálica do eletrodo quando estiver sendo utilizado.

A eletrocirurgia não deve ser realizada perto de soluções ou gases inflamáveis.

Esterilização:

Os eletrodos VOLMED seguem em uma embalagem estéril. A esterilização não é válida caso a embalagem esteja violada.

Os eletrodos são esterilizados por ETO.

A esterilização é válida por DOIS (02) anos, caso a embalagem não esteja violada.

Armazenamento E Transporte:

Os Eletrodos VOLMED devem ser transportados em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação.

Devem ser estocados em local fresco e seco, longe de poeira e umidade.

Rastreabilidade:

Os eletrodos VOLMED possuem lotes, o que tornará sua rastreabilidade possível.

Nome Técnico: Eletrodo Eletrocirúrgico

Nome do produto: Eletrodo Cirúrgico Monopolar VOLMED

Fabricado por: Volmed Brasil Equipamentos Ltda ME

CNPJ: 20.137.275/0001-89

Rua: Av. São Gabriel, 291 | Jardim Paulista

São Carlos-SP | CEP: 13574-540

Responsável Técnico: Rodrigo Gomes da Silva

CREA 5063397397

Registro ANVISA: 81130100034

VÁLIDO ATÉ: 16/09/2029

Fone (16) 3419-1794