

MANUAL DO USUÁRIO

EQUIPO DE IRRIGAÇÃO PARA BOMBA

Nome Comercial: Equipó Volmed para Bomba de Irrigação

Nome Técnico: Equipos



PRODUTO ESTÉRIL

PROIBIDO REPROCESSAR

Rev. 02

FINALIDADE:

A Família de **Equipo Volmed para bomba de Irrigação** é um dispositivo projetado para ser utilizado em conjunto com a Bomba de infusão, para proporcionar a distensão e a irrigação, objetivando a visibilidade e a facilidade da manipulação da instrumentação em procedimentos cirúrgicos.

Todos os **Equipo Volmed para bomba de Irrigação** foram desenvolvidos para serem utilizados por profissionais da área de saúde, que estejam familiarizados com instrumentos cirúrgicos. O cirurgião é responsável pela aprendizagem das técnicas empregadas neste sistema. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Usar técnica asséptica durante todo o procedimento.
2. Conectar o perfurador do Equipo ao frasco de soro contendo a solução medicamentosa a ser administrada.
3. Fazer o priming do circuito com a solução para retirar todo o ar do sistema.
4. Conectar o Luer Lock da ponta distal na agulha de Klein.
5. Introduzir a agulha no tecido celular subcutâneo.
6. Descartar o equipo após a utilização, não reutilizar, material de reprocessamento proibido.

INDICAÇÕES DE USO:

- Artroscopia, histeroscopia ou qualquer tipo de vídeo cirurgia minimamente invasiva, que necessitem de irrigação.

PRECAUÇÕES:

- Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação;
- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica.
- Verificar se o encaixe do conector para fluido e do recipiente estão seguros e não apresentam vazamentos;

- A escolha do fluido de irrigação é determinada pelo profissional com base no método a ser empregado;
- Não pode ser reutilizado.

ESTERILIZAÇÃO:

O produto é esterilizado por óxido de etileno ETO. A esterilização possui validade de três anos se a embalagem estiver inviolada.

RASTREABILIDADE:

Os equipos possuem números de lote que possibilitam seu rastreamento e o seu destino final caso seja necessário.

GARANTIA:

O Equipo de Irrigação é um material de consumo, portanto o mesmo não possui garantia.

LISTA DE CÓDIGOS:

Lista de Códigos	
ST 02 VIAS	AEQU 01
RZ 02 VIAS	AEQU 02
ST 04 VIAS	AEQU 03
RZ 04 VIAS	AEQU 04
LV 02 VIAS	AEQU 05
LV 04 VIAS	AEQU 08
AR 02 VIAS	AEQU 09
FL 02 VIAS	AEQU 10

Fabricante:

VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -EPP

CNPJ: 20.137.275/0001-89

AV. SÃO GABRIEL, 291 | JD. PAULISTA

CEP: 13574-540 | SÃO CARLOS - SP

Responsável Técnico:

Rodrigo Gomes da Silva

CREA-SP 5063397397

Registro ANVISA nº: 81130100013

Tel./Fax: (16) 3419-1794