

MANUAL DE INSTRUÇÕES

EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL VOLMED

Nome Técnico: EQUIPO

PROIBIDO REPROCESSAR



PRODUTO ESTÉRIL

PROIBIDO REPROCESSAR


REV. 00

FINALIDADE

O **Equipo de Irrigação gravitacional** é um dispositivo projetado para ser utilizado com a ação da gravidade, proporcionando a irrigação, com o objetivo de visualizar e facilitar a manipulação da instrumentação em procedimentos cirúrgicos.

O **Equipo de Irrigação gravitacional** foi desenvolvido para ser utilizado por profissionais da área de saúde, que estejam familiarizados com instrumentos cirúrgicos. O cirurgião é responsável pela aprendizagem das técnicas empregadas neste sistema. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL

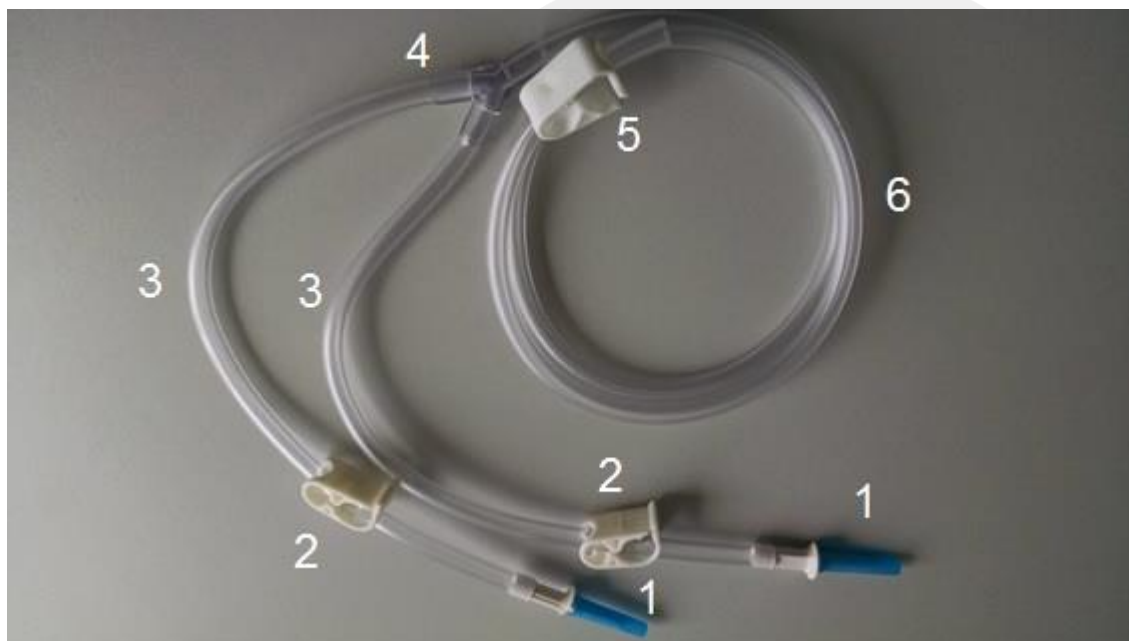

Os modelos dos Equipos de Irrigação são compostos pelas seguintes partes:

- 1 – Conector para o Fluido;
- 2 – Presilha;
- 3 – Tubo de PVC com 200mm de comprimento;
- 4 – Conector em Y;
- 5 – Presilha
- 6 – Tubo de PVC com 1300mm de comprimento;

MODELOS DO EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL

- **Equipo de Irrigação gravitacional tipo Perfurador 02 vias**

Possui 02 conectores perfurador para o soro tipo bolsa.



- **Equipo de Irrigação gravitacional tipo Perfurador 04 vias**

Possui 04 conectores com perfurador para o soro tipo garrafa.



INSTRUÇÕES DE USO

1. Usar técnica asséptica durante todo o procedimento;
2. Conectar o conector do fluido do Equipo ao frasco de soro contendo a solução medicamentosa a ser administrada;
3. Fazer o priming do circuito com a solução para retirar todo o ar do sistema;

4. Conectar a ponta Luer Lock ou ponta mangueira no trocater
5. Descartar o Equipamento após a utilização. Não reutilizar.

PRECAUÇÕES

- Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação;
- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Verificar se o encaixe do conector para fluido e do recipiente estão seguros e não apresentam vazamentos;
- A escolha do fluido de irrigação é determinada pelo profissional com base no método a ser empregado.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO). A esterilização possui validade de 02 anos a partir da data de esterilização, se a embalagem estiver inviolada.

GARANTIA

O Equipamento de Irrigação é um material de consumo, portanto o mesmo não possui garantia.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO:

Equipamento de Irrigação gravitacional 02 vias

Equipamento de Irrigação gravitacional 04 vias

Fabricante:

VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -EPP

AV. SÃO GABRIEL, 291 – JD. PAULISTA

CEP: 13574-540

CNPJ: 20.137.275/0001-89

Responsável técnico:

Rodrigo Gomes CREA-SP 5063397397

Registro ANVISA nº: 81130100008

Tel/Fax: (16) 3419-1794

São Carlos - SP