

INSTRUÇÕES DE USO

KIT CÂNULA DE NASO ENDOSCOPIA VOLMED

Nome Técnico:
KIT CIRURGICO

COD: 23-00-00-00

Produto Estéril.
Fabricante recomenda uso único.
Proibido Reprocessar

Rev. 00

Atenção:

O fabricante recomenda a leitura completa do manual antes da utilização do produto!

KIT CÂNULA DE NASO ENDOSCOPIA VOLMED



Apresentação:

Como o Kit cânula de Naso Endoscopia é apresentado ao mercado:

Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed

O Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed Contém:

- 1- Par De Splint Nasal De Silicone
- 1- Equipo Para Irrigação
- 1- Cânula Para Guia De Ótica

Finalidade:

O Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed é indicado para cirurgias endoscópicas de otorrino, cabeça e pescoço, onde há necessidade do uso cauterização, trocater de irrigação ou aspiração.

Instruções De Uso:

- Verifique se esterilização está válida;
- Verifique as condições da embalagem;
- Abra a caixa e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;

Realize o procedimento cirúrgico aplicável;

Após o procedimento, inutilize o Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed e descarte-o em LIXO HOSPITALAR, pois o mesmo é de uso único.

Precauções:

O Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed, é de uso único e são embaladas e não podem ser reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e se mantêm nesta qualidade dentro das condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se o Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed, que estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade.

O produto é apresentado estéril, portanto sua embalagem (blister) somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento de sua abertura.

Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor.

Procedimentos Relacionados Ao Descarte:

** Procedimentos relacionados a descarte de produto desqualificado, de forma a assegurar sua inutilização para que não seja indevidamente reaproveitado.*

Descarte e não use o Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilização. Recomenda-se que o Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed seja descartado no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local). Para os KIT'S CÂNULA DE NASO ENDOSCOPIA VOLMED que forem removidas das embalagens e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário.

Convém então, que o Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed seja descartado no lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local.

O descarte deve ser realizado seguindo-se as disposições da Resolução RDC n° 306/2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

Restrições E Advertências:

O usuário, antes de utilizar o produto deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no manuseio correto e seguro:

Este produto, somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.

O fabricante deste produto, não pratica a medicina e não recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico, é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente.

Não utilize o Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed que pareça danificado.

Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou danificação do Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed.

Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta.

O produto só deve ser utilizado, por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis.

O produto não deve ser reutilizado e/ou reesterilizado, sendo de uso ÚNICO, devendo ser descartado em LIXO HOSPITALAR.

A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos.

Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes.

Armazenamento:

Antes da utilização, o Kit Cânula De Naso Endoscopia Volmed, deve ser armazenado de forma a manter a integridade da embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;

O Kit C nula De Naso Endoscopia Volmed deve ser armazenado em local seco (umidade m xima de 70%) e conv m que n o sejam expostos diretamente   luz do sol, radia o ionizante, extremos de temperatura (at  40 C), ou contamina o particulada.

Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intemp ries que possam afetar a perfeita conserva o do produto estocado.

Recomenda-se a utiliza o do princ pio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Conv m que seja adotada a pr tica de rota o de estoque para todos os Kits, em todas as  reas de estocagem.

Transporte:

  necess rio, que n o seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para n o danificar a embalagem e evitar a contamina o consequente disso.

Os Kit’s, devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou altera o com rela o  s condi es de recebimento de sua embalagem.

Rastreabilidade:

O Kit C nula De Naso Endoscopia Volmed possui lote e o sistema de vendas integrado ao sistema de qualidade, possibilita o seu rastreamento e o destino final caso seja necess rio.

Esteriliza o:

A esteriliza o   realizada por ETO- Oxido Etileno e possui validade de 02 anos. As embalagens possuem indicadores de esteriliza o junto ao r tulo do produto.

Fabricado por:

Volmed Brasil Equipamentos Ltda – EPP

Av. S o Gabriel, 291 | Jd. Paulista | CEP: 13574-540 | S o Carlos | SP

Fone: (16) 3419-1794

CNPJ: 20.137.275/0001-89

Respons vel T cnico: Rodrigo Gomes da Silva

CREA 5063397397

Registro ANVISA: 81130100023