

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **KIT CÂNULA PARA CIRURGIA DE LARINGE**

Nome Técnico: KIT INSTRUMENTAL

CODIGO DO PRODUTO ANVISA: 21-00-00-00

**Produto Estéril.**  
**Fabricante recomenda uso único.**

**Rev. 00**

## **DESCRIÇÃO:**

O KIT CÂNULA PARA CIRURGIA DE LARINGE é composto de instrumentais específicos para micro lesões de laringe e possibilita um procedimento com maior precisão e mais agilidade.

## **INSTRUÇÕES DE USO:**

Verifique se esterilização esta válida e se a embalagem não encontra-se violada.

Abra a caixa e retire o blister selado e em seguida retire o produto;

Realize o procedimento cirúrgico aplicável de acordo com as técnicas do médico responsável;

Após o procedimento, inutilize o KIT CÂNULA PARA CIRURGIA DE LARINGE e descarte-o em LIXO HOSPITALAR, pois o mesmo é de uso único.

## **PRECAUÇÕES:**

O fabricante recomenda uso único para o KIT CÂNULA PARA CIRURGIA DE LARINGE. Somente use o KIT CÂNULA PARA CIRURGIA DE LARINGE se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

O produto é apresentado estéril, embalado em blister e papel grau cirúrgico e caixa de papel couchê, portanto sua embalagem (blister) somente deve ser aberta somente no momento da cirurgia. Caso a embalagem esteja com sinais de avarias ou aberta, o material não deve ser utilizado e o fabricante deverá ser comunicado.

**O descarte deverá ser feito de acordo com as normas do hospital, ou descartado em lixo hospitalar quando não houver um protocolo.**

## **RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

O profissional que irá utilizar o Kit, deverá ler o manual antes de iniciar a cirurgia.

Este produto somente pode ser utilizado, sob prescrição médica ou sua supervisão.

O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda qualquer técnica cirúrgica para o uso. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico, é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de cirurgia e paciente.

Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou danificação do KIT CÂNULA PARA CIRURGIA DE LARINGE.

O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto.

O produto não deve ser reutilizado e/ou reprocessado, fabricante recomenda uso único, devendo ser descartado em LIXO HOSPITALAR.

A embalagem não deve conter nenhum sinal de avaria e deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos.

**ARMAZENAMENTO:**

O KIT CÂNULA PARA CIRURGIA DE LARINGE deve ser armazenado em local seco e o fabricante recomenda que não seja exposto diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

**TRANSPORTE:**

O material deve ser transportado de maneira que não fique exposto ao sol e a umidade.

Não empilhar vários materiais sobre ele e evitar quedas.

**RASTREABILIDADE:**

O KIT CÂNULA PARA CIRURGIA DE LARINGE possui número de lote e o sistema de vendas integrado ao sistema de qualidade possibilita o seu rastreamento e o destino final caso seja necessário.

**ESTERILIZAÇÃO:**

A esterilização é realizada por ETO- Oxido etileno e possui validade de 2 anos. As embalagens possuem indicadores de esterilização junto ao rótulo do produto.

**Fabricante, Comércio e Distribuição:**

Volmed Brasil Equipamentos Ltda. EPP

CNPJ: 20.137.275/0001-89

Responsável Técnico: Rodrigo Gomes da Silva

CREA-SP- 5063397397

Registro ANVISA: 81130100019

Av. São Gabriel, 291 | CEP: 13574-540 | Jardim Paulista

São Carlos- SP | Tel/Fax: (16) 3419-1794