

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LONG BLADE VOLMED

NOME TÉCNICO: MICRODEBRIDADOR

Produto Estéril.

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

Rev. 00

Atenção:

O fabricante recomenda a leitura completa do manual antes da utilização do produto!

Introdução:

A família de Cânulas Long Blade VOLMED, consiste em um conjunto de centenas de modelos, com aplicações cirúrgicas e que devem ser acopladas a equipamentos do tipo “shaver”. Promovem simultaneamente o corte e a eliminação de dejetos. Suas partes fixas e móveis de corte são produzidas em metal de grande dureza (tubo aço inoxidável) e com dimensional controlado, o que minimiza o atrito, garantindo precisão no corte e mantendo-se a afiação por toda a sua vida útil.

Cortes Disponíveis:

IA| EGG| BA| BD| BO| BR

Diâmetros:

3,0| 3,2| 3,5| 4,0| 4,2| 4,5| 5,0| 5,2| 5,5mm

Comprimentos:

240| 284| 360mm

Angulações:

Reta| 15°| 30°| 45°

Descrição Geral:

A família de Cânula Long Blade VOLMED é composta por uma cânula de corte e sucção montadas dentro de outra com função de guia.

A cânula é fornecida em caixa de papelão, embalada em plástico especial para produto estéril e acompanha o manual de instruções, todo o conjunto é esterilizado por ETO.



Todos os modelos têm sua estrutura semelhante, mesmo processo produtivo (usinagem de precisão e montagem), mesmo material, diferenciando-se, na extremidade de corte, conforme tabela abaixo:

Obs: Todos Os Modelos Possuem De 240mm À 360mm De Comprimento

Uso Do Produto

O uso é recomendado para as seguintes aplicações:

- Procedimentos Cirúrgicos de Coluna;
- Endoscopias;
- Cirurgias Discectomia Percutâneas;
- Cirurgias em geral;

Precauções Ao Usar:

A cânula só deve ser manipulada por pessoa habilitada (médico).

Verificar a integridade do produto antes do uso, observando eventuais danos mecânicos (torta, amassada ou quebrada).

A retirada da cânula da peça de mão só deve ser realizada após certificar-se que não apresente superaquecimento.

Cuidados Especiais No Manuseio Das Cânulas:

A embalagem interna só deve ser violada momentos antes do procedimento;

Ao encaixar a cânula no equipamento shaver, verificar se a conexão foi bem feita;

Acionar o equipamento para verificar se a cânula está girando livremente;

Restrições Importantes De Uso:

Não utilize cânulas que apresentem violação de embalagem;

Não utilize cânula em mau estado (tortas ou quebradas);

Nunca utilize em equipamento que apresente superaquecimento;

Não utilizar a cânula se não estiver girando livremente.

Descarte:

Após o uso, as cânulas devem ser descartadas junto com o lixo contaminado. Não podem ser reutilizadas. Fabricante recomenda uso único.

Armazenamento E Transporte:

As cânulas devem ser transportadas em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e umidade.

Condições ambientais:

Temperatura: 10 °C a 30 °C.

Umidade Relativa: 30% a 75%;

Pressão Atmosférica: 700hPa a 1060hPa.

Esterilização:

A Esterilização é feita através de ETO.

A esterilização possui validade de cinco anos (05) a partir da data de fabricação.

Caso a embalagem esteja violada essa garantia é automaticamente cancelada.

Rastreabilidade:

As cânulas para Microdebridação VOLMED possuem lotes que possibilitam seu rastreamento e o seu destino final caso seja necessário.

Garantia:

As cânulas Long Blade VOLMED, possuem garantia de 4 meses contra defeitos de fabricação. A garantia NÃO cobre o desgaste das cânulas que acontece após a cirurgia.

Link para acessar os modelos:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351334945202025/?cnpj=20137275000189>

Fabricante:

VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -EPP
AV. SÃO GABRIEL, 291 – JD. PAULISTA
CEP: 13574-540 - São Carlos - SP
CNPJ: 20.137.275/0001-89
Responsável Técnico:
Rodrigo Gomes da Silva
CREA-SP 5063397397
Registro ANVISA
Nº: 81130100045
Tel.:(16) 3419-1794