

INSTRUÇÕES DE USO

MICROCÂNULAS UNEFLEX

Nome Técnico: CANULAS METÁLICAS

CODIGO: 43-00-00-00

Produto Estéril.
Reprocessamento Proibido.

MICROCÂNULAS UNEFLEX

Atenção:

O fabricante recomenda a leitura completa do manual antes da utilização do produto!

Função e Indicação da Família MICROCÂNULAS UNEFLEX

As MICROCÂNULAS UNEFLEX são projetados para uso na estética facial, auxilia no início da perfuração e posterior introdução da MICROCÂNULA.

Indicações:

A Microcânula Uneflex é indicado para aplicações de preenchedores (ácido hialurônico) na camada hipoderme da região facial.

Material:

Ponta da Rosca: Polipropileno

Cânula – Aço Inoxidável AISI 304


Modo De Uso:

- 1) Retire da embalagem a MICROCÂNULA e acople através de sua rosca a seringa a ser utilizada.
- 2) Com uma anestesia local, a microcânula é inserida através de um furo com menos de um milímetro de diâmetro.
- 3) Após a inserção da microcânula, a substância para preenchimento é liberada de forma gradativa e uniforme graças ao orifício lateral
- 4) Após a utilização o produto deverá ser descartado de acordo com as normas hospitalares.

OBS: A seringa não faz parte deste registro, devendo ser adquirido e registrado separadamente.

Modelos:

MICROCÂNULAS UNEFLEX

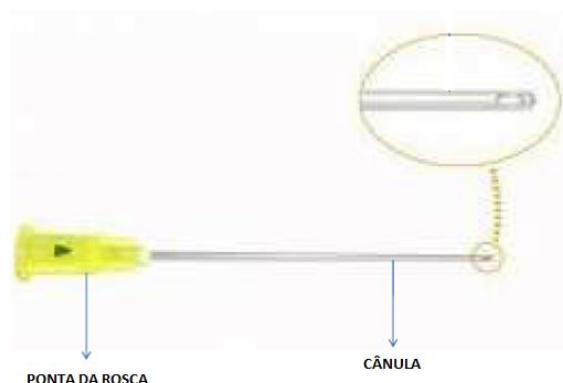

CÓDIGO	MODELO	ESPESSURA/CALIBRE DA CÂNULA (G)	COMPRIMENTO DAS CÂNULAS (mm)
43-01-01-00	30Gx25mm	30	25
43-01-02-00	27Gx38mm	27	38
43-01-03-00	27Gx50mm	27	50
43-01-04-00	25Gx38mm	25	38
43-01-05-00	25Gx50mm	25	50
43-01-06-00	23GX38mm	23	38
43-01-07-00	23Gx50mm	23	50
43-01-08-00	22Gx38mm	22	38
43-01-09-00	22Gx50mm	22	50
43-01-10-00	21Gx50mm	21	50
43-01-11-00	21Gx70mm	21	70
43-01-12-00	18Gx50mm	18	50
43-01-13-00	18GX70mm	18	70
43-01-14-00	17Gx70mm	17	70
43-01-15-00	17Gx100mm	17	100
43-01-16-00	18Gx80mm	18	80
43-01-17-00	18Gx100mm	18	100

43-01-18-00	18Gx110mm	18	110
43-01-19-00	19Gx50mm	19	50
43-01-20-00	19Gx70mm	19	70
43-01-21-00	20Gx40mm	20	40
43-01-22-00	20Gx50mm	20	50
43-01-23-00	20Gx70mm	20	70
43-01-24-00	20Gx100mm	20	100
43-01-25-00	21Gx25mm	21	25
43-01-26-00	21Gx30mm	21	30
43-01-27-00	21Gx40mm	21	40
43-01-28-00	22Gx70mm	22	70
43-01-29-00	22Gx90mm	22	90
43-01-30-00	23Gx30mm	23	30
43-01-31-00	23Gx70mm	23	70
43-01-32-00	24Gx38mm	24	38
43-01-33-00	24Gx50mm	24	50
43-01-34-00	25Gx30mm	25	30
43-01-35-00	25Gx70mm	25	70
43-01-36-00	26Gx25mm	26	25
43-01-37-00	26Gx38mm	26	38
43-01-38-00	26Gx50mm	26	50
43-01-39-00	27Gx25mm	27	25
43-01-40-00	27Gx40mm	27	40
43-01-41-00	30Gx40mm	30	40
43-01-42-00	18Gx30mm	18	30
43-01-43-00	18Gx38mm	18	38

Classificação:

Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

Classificação: Regra 6 – Classe II

Especificações:

Esterilizado por: Oxido de Etileno

O produto é esterilizado por óxido de etileno e possui validade de 05 anos a partir da data de fabricação, se a embalagem não estiver violada.

Validade: Está associada a validade da esterilização, ou seja, cinco anos.

Transporte e Armazenamento:

As MICROCÂNULAS UNEFLEX devem ser transportadas em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violações.

Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e umidade

Descarte:

Após sua utilização, as MICROCÂNULAS UNEFLEX poderá causar contaminação ambiental e para que não seja utilizado indevidamente, este deverá ser descartado conforme determina a legislação local.

Advertências:

- Proibido Reprocessar
- Produto Estéril - Óxido de Etileno
- O produto deve ser utilizado apenas por médicos ou outros profissionais qualificados que tenham conhecimento de utilização do produto.
- O produto é fornecido estéril desde que a embalagem tenha sido manuseada de maneira adequada e não esteja aberta e nem danificada. Não utilize o produto em caso de danos visíveis na embalagem

Segurança – Precauções Importantes:

Utilize apenas caso a embalagem não esteja violada.

A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;

Não reutilizar o produto, pois o mesmo é de **uso único**.

Apresentação do Produto:

Embalagem primária: Envelope grau cirúrgico, atóxico, resistente à esterilização e com características de barreira biológica.

Embalagem Secundária: Caixa de papelão

Quantidade de itens que compõe o produto:

01 Microcânula UNEFLEX;

01 Instrução de Uso;

Fabricado por:

Volmed Brasil Equipamentos Ltda – EPP

Av. São Gabriel, 291 | Jd. Paulista | CEP: 13574-540

São Carlos | SP

Fone: (16) 3419-1794

CNPJ: 20.137.275/0001-89

Responsável Técnico: Rodrigo Gomes da Silva

CREA 5063397397

Registro ANVISA: 81130100035

Nome Técnico: CÂNULAS METÁLICAS