

INSTRUÇÕES DE USO

NOSE STICKER

Nome Técnico: TALA NASAL EXTERNO

CODIGO: 42-00-00-00

Produto Estéril.
Fabricante recomenda uso único.

Rev. 00

Atenção:

O fabricante recomenda a leitura completa do manual antes da utilização do produto!

Função e Indicação da Família NOSE STICKER

Os tampões nasais NOSE STICKER são projetados para uso em uma variedade de cirurgias nasais, tais como:

- Cirurgia plástica
- Rinoplastia
- E outras cirurgias relacionadas a otorrinolaringologia.

Possibilita um suporte ao septo nasal de modo a facilitar a cicatrização pós operatória.

É de fácil instalação e retirada, seu uso é muito melhor que o uso do gesso e bandagens, tem uma estrutura ergonômica, facilitando na sua colocação e retirada.

Indicações:

O tampão nasal externo é indicado para a fixação do septo nasal pós cirúrgico.

Material:

Termoplástico

Modelos:

Nose Sticker Termoplastic



Tala externa fabricada em termoplásticos

| MODELO | CODIGO | DIMENSÕES | MATERIAL | PEÇAS/CAIXA |
|---------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| EXTERNO | 42-01-01-00 | 3,5X3,5X5,5 (P) | TERMOPLASTICO | 10 PEÇAS |
| EXTERNO | 42-01-02-00 | 4,0X4,0X6,0 (M) | TERMOPLASTICO | 10 PEÇAS |
| EXTERNO | 42-01-03-00 | 4,5X4,5X6,0 (G) | TERMOPLASTICO | 10 PEÇAS |

Especificações:

Esterilizado por: Oxido de Etileno

O produto é esterilizado por Óxido De Etileno - ETO e possui validade de 03 anos a partir da data de fabricação, se a embalagem não estiver violada.

Validade: Está associada a validade da esterilização, ou seja, três anos.

Transporte e Armazenamento:

O NOSE STICKER deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violações.

Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e umidade

Descarte:

Após sua utilização, o NOSE STICKER poderá causar contaminação ambiental e para que não seja utilizado indevidamente, este deverá ser descartado conforme determina a legislação local.

Contra Indicações:

Não há contra indicações para este produto.

Segurança – Precauções Importantes:

Utilize apenas caso a embalagem não esteja violada.

A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;

Não reutilizar o produto, pois o mesmo o fabricante recomenda uso único.

Apresentação do Produto:

Embalagem primária – Blister em PET Virgem selado com papel Tyvek.

Embalagem secundária: Caixa de papel coche.

Quantidade de itens que compõe o produto:

Cada blister contém um (01) tala externa.

Cada caixa contém (10) talas externa do mesmo modelo

Link Anvisa:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351441348201912/?cnpj=20137275000189>

Fabricado por:

Volmed Brasil Equipamentos Ltda – EPP

Av. São Gabriel, 291 | Jd. Paulista | CEP: 13574-540

São Carlos | SP

Fone: (16) 3419-1794

CNPJ: 20.137.275/0001-89

Responsável Técnico: Rodrigo Gomes da Silva

CREA 5063397397

Registro ANVISA: 81130100031

Nome Técnico: Talas