

INSTRUÇÕES DE USO

PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI

Nome Técnico: Eletrodo Cirúrgico

COD: 32-XX-XX-XX



Rev.00

Atenção:

O fabricante recomenda a leitura completa do manual antes da utilização do produto!

Apresentação e Utilizações:

As PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI são utilizados em procedimentos cirúrgicos Artroscópicos monopolar. São utilizados para Ablação e Coagulação nos seguintes procedimentos; Pé, mão, punho, tornozelo, buco maxilo e otorrino.

Cabe ao Cirurgião responsável o domínio e a aprendizagem das técnicas utilizadas neste sistema, cuja utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis aos pacientes.

As PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI deve ser utilizado em conjunto com canetas eletrocirúrgicas que possuam encaixe sob pressão, com um intervalo de diâmetro entre 2,5 – 2,8 mm.

Modelos

As PONTEIRAS DESCARTAVEIS CONNECT MINI estão disponíveis nos seguintes modelos:

ROUNDED 0°	100 MM COMPRIMENTO
ROUNDED 30°	100 MM COMPRIMENTO
ROUNDED 45°	100 MM COMPRIMENTO
ROUNDED 60°	100 MM COMPRIMENTO
ROUNDED 90°	100 MM COMPRIMENTO
STRIPED 0°	100 MM COMPRIMENTO
STRIPED 30°	100 MM COMPRIMENTO
STRIPED 45°	100 MM COMPRIMENTO
STRIPED 60°	100 MM COMPRIMENTO
STRIPED 90°	100 MM COMPRIMENTO

SHELL 0°	100 MM COMPRIMENTO
SHELL 30°	100 MM COMPRIMENTO
SHELL 45°	100 MM COMPRIMENTO
SHELL 60°	100 MM COMPRIMENTO
SHELL 90°	100 MM COMPRIMENTO


Imagens dos Modelos:




Rounded



Striped

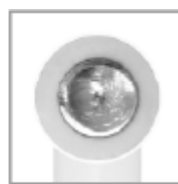

Shell

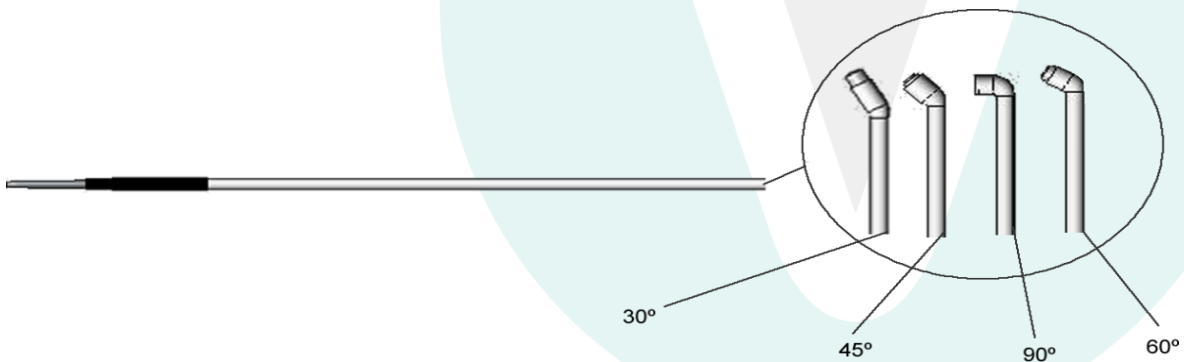

Instruções de uso:

Antes de Utilizar as PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI verifique se a embalagem não está violada, retire o Eletrodo e insira no Bisturi Eletrônico, verifique se sua parte metálica encontra-se completamente inserida.

Durante os procedimentos as PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI devem estar a uma distância de 1 a 3 mm no procedimento de coagulação e aproximadamente 1mm no procedimento de ablação da superfície.

Conhecendo o Produto



Contra Indicações:

As PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI não devem ser utilizados em pessoas que usam Marca-Passo ou outros dispositivos eletrônicos implantáveis.

Precauções:

Por se tratar de um produto ESTERIL após o uso devem ser descartados.

Cabe ao Cirurgião responsável o domínio e a aprendizagem das técnicas utilizadas neste sistema.

Antes de utilizar o equipamento leia atentamente as Instruções de uso.

O mau uso pode acarretar queimaduras aos pacientes.

Caso as PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI apresente qualquer falha no seu isolamento o mesmo deve ser descartado.

Esterilização:

As PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI seguem em uma embalagem estéril. A esterilização não é válida caso a embalagem esteja violada.

As PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI são esterilizados por ETO.

A Esterilização é válida por TRÊS anos, caso a embalagem não esteja violada.

Armazenamento e Transporte:

As PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI devem ser transportados em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação.

Devem ser estocados em local fresco e seco, longe de poeira e umidade.

Nome Técnico: Eletrodo Cirúrgico

Nome do produto: PONTEIRAS DE ABLAÇÃO CONNECT MINI

Fabricado por: Volmed Brasil Equipamentos Ltda ME

CNPJ: 20.137.275/0001-89

Rua: Av. São Gabriel, 291.

Jardim Paulista

São Carlos-SP-Cep 13574-540

Responsável Técnico: Rodrigo Gomes da Silva

CREA 5063397397

Registro ANVISA:

Assistência Técnica: Fone (16) 3419-1794

Rodrigo Gomes da Silva

Responsável Técnico